

Musterablaufplan zur Desinfektion der Absauggeräte

Das Absauggerät sollte, wenn der Hersteller keine anderes Vorgehen empfiehlt, einmal täglich desinfizierend gereinigt werden.

Die Aufbereitung darf nur durch geschultes Personal durchgeführt werden.

Ablauf:

- Händedesinfektion
- Anziehen von Einmalhandschuhen, Schutzkittel und Mund-Nasenschutz
- Einfüllen von 10-20ml Desinfektionsmittel in den Absaugbehälter
- Herstellen einer fertigen Desinfektionsmittellösung nach Herstellerangaben
- Durchspülen des Absaugschlauches mit der fertigen Desinfektionsmittellösung
- Einfüllen einer fertigen Desinfektionslösung in die Instrumentenwanne
- Einlegen der kontaminierten Teile des Absauggerätes in die Instrumentenwanne (Cave: Keine Filter)
- Auf vollständige Bedeckung der Teile mit Desinfektionsmittellösung achten
- Nach Ablauf der Einwirkzeit Abspülen der Teile mit Leitungswasser
- Trennen des Absauggerätes von der Stromversorgung
- Abwischen des Absauggerätes mit desinfektionsmittelgetränkten Tüchern (Wipes), Ggf. Herstellerangaben beachten
- Wiedereinbau der desinfizierten Teile nach vollständiger Trocknung

Nach Beendigung der Aufbereitung erfolgt abschließend eine Händedesinfektion.